

# Tubifast™

WITH  
**2-WAY STRETCH™**  
TECHNOLOGY

## Le bandage tubulaire pratique

- Idéal pour fixer des pansements et protéger la peau quelle que soit la partie du corps concernée
- Maintient efficacement les pansements en place sans bande adhésive ni agrafe
- Egalement indiqué comme bande de contention
- Plusieurs dimensions disponibles
- Peut être découpé sur mesure et étiré sur le pansement pour une coupe uniforme
- Lavable à la main
- Economique

Tubifast™ 2-Way stretch maintient efficacement les pansements en place sans serrer ni comprimer

Sa légère élasticité permet une liberté de mouvement totale pour les patients

Nombreuses références disponibles différenciées par des codes de couleur par dimension

Coupe adéquate qui s'adapte aussi bien aux membres de petite taille qu'aux cages thoraciques adultes

Bandage tubulaire ne nécessitant ni bande adhésive ni agrafe



## Mode d'emploi

1. Choisissez un bandage de la largeur souhaitée. Utilisez les codes de couleur sur les références. Découpez à la bonne longueur.
2. Étirez Tubifast™ 2-Way stretch sur la zone concernée.
3. Appliquez Tubifast™ 2-Way stretch sur le pansement.



## Applications

Tubifast™ peut être utilisé comme bandage de fixation ou comme protection quelle que soit la partie du corps concernée. Il est également indiqué comme bande de contention. En tant que bandage tubulaire, Tubifast™ convient particulièrement pour maintenir les pansements en place sur des parties du corps difficiles à panser, des membres amputés et/ou des moignons, etc.

Mölnlycke Health Care SA  
Berchemstationstraat 72 boîte 2 • 2600 Berchem (Anvers)  
Tél: +32(0)3 286 89 50 • Fax: +32(0)3 286 89 52  
www.molnlycke.com

Tubifast™ 2-Way stretch et son conditionnement ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel

## Mode d'action de Tubifast™?

Tubifast™ 2-Way stretch est un bandage en viscose tissé de fils élastiques très fins afin d'assurer une légère élasticité. Tubifast™ 2-Way stretch maintient efficacement les pansements en place sans serrer ni comprimer. Aucune bande adhésive ni d'agrafe n'est nécessaire. Sa légère élasticité permet une liberté de mouvement totale pour les patients.

Tubifast™ 2-Way stretch existe en 6 dimensions adaptées à chaque partie du corps.

Chaque dimension est différenciée des autres par une ligne colorée cousue dans le bandage. Tubifast™ combine rapidité et facilité d'utilisation : il suffit de le couper à la mesure souhaitée et de l'étirer pour obtenir une coupe uniforme non compressive.

## Avantages de Tubifast™ 2-Way stretch

- Maintient efficacement les pansements en place sans gêner ni comprimer
- Offre aux patients une liberté de mouvement totale
- Ne requiert ni bande adhésive ni agrafe
- Lavable à la main
- Rapide et simple à utiliser : il suffit de le couper à la mesure souhaitée et de l'étirer pour obtenir une coupe uniforme non compressive
- Existe en une série de références différenciées par un code de couleur convenant aussi bien aux membres de petite taille qu'aux cages thoraciques adultes
- Economique

Tubifast™ 2-Way stretch est fourni en emballage unitaire

Produit	N° d'art.	code CNK/ pièce	Largeur x Longueur
<b>GAMME ROUGE</b>	2480	2380-285	3.5cm x 1m
Small (membres)	2434	0628-180	3.5cm x 10m
<b>GAMME VERTE</b>	2481	2380-293	5cm x 1m
Small en Medium (membres)	2436	0628-198	5cm x 10m
<b>GAMME BLEUE</b>	2482	2380-301	7.5cm x 1m
Large (membres)	2438	0628-206	7.5cm x 10m
<b>GAMME JAUNE</b>	2483	2380-319	10.75cm x 1m
Extra-large (membres, tête, cage thoracique d'enfant)	2440	0628-214	10.75cm x 10m
<b>GAMME BEIGE</b>	2484	2380-327	17.5cm x 1m
Cage thoracique adulte	2442	0628-222	17.5cm x 10m
<b>GAMME POURPRE</b>	2479	2380-277	25cm x 1m
Large (cage thoracique adulte)	2444	2380-269	25cm x 10m

## Matière

Viscose, élasthanne et polyamide

## Instructions de lavage



**Mölnlycke®**